

# LOT DE 10 MASQUES BARRIÈRES LAVABLES ET RÉUTILISABLES



REF : **M434 073 999**

› Conditionnement :  
lot de 10 masques dans 1 sachet

**28 €<sup>HT</sup>** le lot  
soit 2,80 €<sup>HT</sup> / masque

## Masque barrière en tissu fabriqué en Union Européenne selon la norme AFNOR SPEC S76-001 : 2020

- › **Efficacité de filtration des particules** de  $3\mu\text{m}$  > 90 %
- › **Respirabilité** : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup> pour une dépression de 100 Pa
- › Homologation **DGA Catégorie 1 UNS1**
- › Fabriqué en **Union Européenne**

### DESCRIPTIF :

- › Masque barrière.
- › Multicouches, lavable et **réutilisable (10 lavages max)\***.
- › Conçu pour protéger le porteur du masque et les personnes qui l'entourent, **pendant 4 heures (durée optimale)**.
- › Masque de protection constitué de 3 couches textiles.
- › Positionnement sur le visage par 1 jeu de brides qui entourent la tête.
- › Léger, confortable et couvrant.
- › Taille unique.

### COMPOSITION :

- › Tissu 3 couches textile.
- › Intérieur en coton pour la douceur et le confort.
- › Couche intermédiaire en polyester micro texturé.
- › Extérieur non tissé en polyamide.

### ENTRETIEN :



### AVANTAGES :

A raison de 2 masques par jour et par personne (soit 10 masques pour 1 semaine) et en respectant un lavage hebdomadaire à 60°C, 10 masques textile vous tiendront 10 semaines, contre 100 masques jetables.

### CONSEILS D'UTILISATION :

Avant le 1<sup>er</sup> usage, effectuez un lavage machine à 60°C suivi d'un séchage machine.

**Durée optimale d'utilisation du masque : 4 heures.**

#### METTRE EN PLACE LE MASQUE

1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
2. Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage.
3. Tenir le masque, passer les brides derrière la tête, baisser pour couvrir le menton.
4. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains.

#### RETIRER LE MASQUE

1. Retirer le masque en saisissant les brides à l'arrière, sans toucher la partie avant.
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu'au prochain lavage.
3. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.

### MÉTHODES DE LAVAGE :

- › Lavage traditionnel : cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum à 60°C (pas d'adoucissant).
- › Séchage au séchoir après le lavage : le masque ne doit pas sécher à l'air libre. **Pour une efficacité optimale, les masques barrières doivent être absolument secs** (toutes les couches à cœur) **avant réutilisation**.

\* Avertissement : Le masque barrière contre le Covid-19 n'exonère absolument pas le porteur contre les gestes barrières essentiels.  
**Pour des raisons sanitaires aucun retour, échange ou reprise ne sera effectué.**